



Sitztiefe Tabelle

NEOX

Neox Sitztiefeverstellung in Kombination mit verschiedenen Rückenlehnentypen			
	Einstellung Rückseite des Moduls	Einstellung Position der Rückentiefe	Anmerkung
Newton FLX2 Rückenlehne	Gleich der gewünschten ST	Mittlere Position ¹	
Newton Curve Rückenlehne	Gewünschte ST + 4 cm	Mittlere Position ²	<ul style="list-style-type: none"> • ST 56 cm ist ausgeschlossen • In Kombination mit einer Newton Curve Rückenlehne ist bei Seitenrahmengröße 1 nur ST 40 bis 42 cm möglich

1 Bei ST 48 cm in Kombination mit Seitenrahmengröße 1 wird die Position der Rückentiefe auf die hintere Position eingestellt

2 Bei ST 54 cm wird die Position der Rückentiefe auf die hintere Position eingestellt