



Zitdieptetabel

NEOX

Instelling Zitdiepte Neox icm de verschillende rugleuningtypes			
	Instelling achtermodule	Instelling rugdieptepositie	Opmerking
Newton FLX2 rugleuning	Gelijk aan gewenste ZD	Middelste stand ¹	
Newton Curve rugleuning	Gewenste ZD + 4 cm	Middelste stand ²	<ul style="list-style-type: none"> • ZD 56 cm is uitgesloten • I.c.m. een Newton Curve rugleuning is met zijframemaat 1 alleen ZD 40 tm 42 cm mogelijk

1 Bij ZD 48 cm i.c.m. zijframemaat 1 is de rugdieptepositie ingesteld op de achterste positie

2 Bij ZD 54 cm is de rugdieptepositie ingesteld op de achterste positie